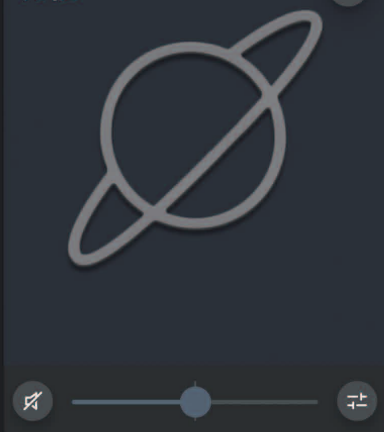


Android対応スマートフォンを  
お使いの方へ

万能



万能

ミュージック

聞きたい方向を  
選択

# MAGNIFYアプリ 設定ガイド

2021.06

**WIDEX MAGNIFY™**

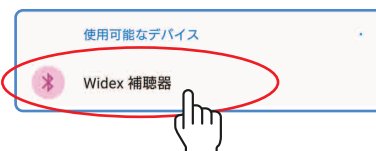
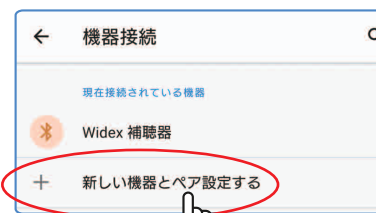
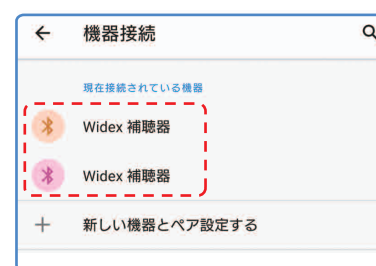
まずはアプリをダウンロード



※Android 7.0以降、Bluetooth4.2以降に対応。  
※スマートフォンの機種により使用できない場合がありますので予めご確認ください。

MAGNIFYアプリは、mRIC R D / RIC 312 D / BTE 13 Dモデル専用です。

## スマートフォンとMAGNIFYのペアリング

**1** **注意** はじめに補聴器の電源を**オフ**しておきます。設定>機器接続の順にタップします。  
スマートフォンのBluetoothをオンにします。**2** **新しい機器とペア設定する**をタップします。**重要** ここで補聴器の電源を入れます。**3** 検索された「補聴器の名前」をタップします。ペアリングには1分程かかることがあります。**4** 両耳装用の場合はもう一度**新しい機器と設定する**をタップし「補聴器の名前」をタップして設定を行います。**5** 現在接続されている機器に補聴器の名前が登録されればスマートフォンと補聴器のペア設定は完了です。ホームボタンをタップしホーム画面に戻ります。**6** MAGNIFYアプリをタップして起動します。スマートフォンでMAGNIFYを操作できるようになります。

※画面はAndroid10の画面です。お使いのスマートフォンによっては表示が異なる場合があります。

**!** スマートフォンと補聴器が接続できない場合は次の操作をお試しください。

- **mRIC R D**:プログラムボタンを長押しし、電源オフにした後再度プログラムボタンを長押ししてしばらく待つ。
- **RIC 312 D/BTE 13 D**:バッテリードアを開け、5秒以上経過してからバッテリードアを閉め、しばらく待つ。
- スマートフォンのBluetoothを一度オフにし、10秒程度経過してから再びオンにする。
- スマートフォンを再起動してから、再度補聴器との接続を試す。