



使用する電池

今日からはじめる 補聴器使い方ガイド

WIDEX
HIGH DEFINITION HEARING



耳かけ型 補聴器

1 電池の入れ方



電池パックから電池を1つ取り出し、保護シールをはがします。



バッテリーホルダーを矢印の方向に開けます。



プラス面には
+の刻印があります



電池のプラス(+)、マイナス(-)を確認し
バッテリーホルダーに入れます。


2 装着の仕方



チューブには触れず、補聴器本体を持ちます。



補聴器を耳に掛け補聴器本体を前後に動か
して、しっかりと耳に乗せます。

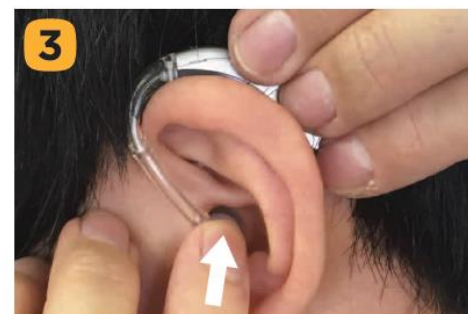

補聴器本体を抑えながら耳せんを耳あなへ挿
入。最後に指先で押してしっかりと収めます。

！故障かな？と思ったら

以下の項目をチェックしてみましょう。

音が出ない

- 電池は入っていますか？
- 電池のシールははがしましたか？
- 電池の+、-の向きが逆さまではありませんか？
- バッテリーホルダーは、しっかり閉まっていますか？

音が小さい

- 新しい電池と交換してみてください
- ボリュームコントロール付きの場合、ボリュームが下がっていませんか？
- 音の出口や入口に耳あかやゴミが詰まっていませんか？

各部の名称 (例:FAモデル)



※モデルにより各部の位置が異なる場合があります。

3 お手入れの仕方



付属のクロスで表面の汚れを拭き取ります。



付属の掃除用ブラシを使って音の出口を下に向けてブラッシングします。

イヤモールドや耳せんも1ヶ月に1回は洗浄しましょう。専用のクリーナーのご使用をおすすめしますが、ない場合は、就寝時に補聴器本体からはずして(石鹸を入れた)水やぬるま湯につけておくだけで汚れが落ちやすくなります。チューブの中に入った水は、エアブローを使って吹き飛ばします。



便利なお手入れ用品



●補聴器掃除用ブラシ

4 保管の仕方

湿気は補聴器の大敵です。電池を外し、バッテリーホルダーを開いた状態で「補聴器乾燥ケース」へ入れましょう。



電池は外します

乾燥剤は新しいものを使いましょう



青い粒がピンクになったら乾燥剤の交換時期です。



●エアブロー



ワイデックス株式会社

本社 〒131-0034 東京都墨田区堤通 1-19-9
リバーサイド隅田セントラルタワー

補聴器ユーザー様専用フリーダイヤル：
TEL ☎ 0120-332-604 FAX ☎ 0120-332-394
ホームページ：<https://japan.widex.com/>

補聴器のご相談、ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。