

今日からはじめる  
**補聴器使い方ガイド**

**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING



使用する電池

PR536 (10)

PR41 (312)

**RIC/RITE**  
補聴器

# 1 電池の入れ方




電池パックから電池を1つ取り出し、保護シールをはがします。



バッテリーホルダーを矢印の方向に開けます。



プラス面には  
十の刻印があります

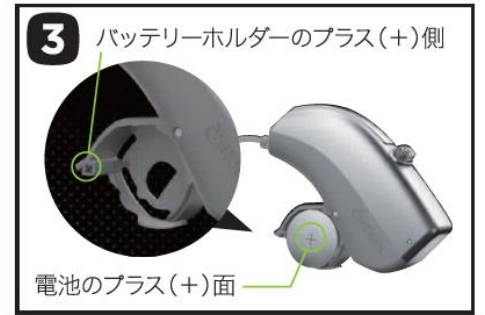

電池のプラス(+)、マイナス(-)を確認し  
バッテリーホルダーに入れます。

# 2 装着の仕方



補聴器本体と耳せんを持ちます。



外耳道へ耳せんをゆっくりと挿入します。



耳せんが外耳道に収まったら、補聴器本体を耳の後ろに掛けます。この時、イヤワイヤが耳のラインに、ぴったりと沿うように掛けます。イヤワイヤを引っ張ったり、ねじったりしないように注意しましょう。

-----箇所には隙間ができないように掛けます。

# ！故障かな？と思ったら

以下の項目をチェックしてみましょう。

## 音が出ない

- 電池は入っていますか？
- 電池のシールははがしましたか？
- 電池の+、-の向きが逆さまではありませんか？
- バッテリーホルダーは、しっかり閉まっていますか？

## 音が小さい

- 新しい電池と交換してみてください
- ボリュームコントロール付きの場合、ボリュームが下がっていませんか？
- 音の出口や入口に耳あかやゴミがつかまっていませんか？

各部の名称 (例: F2モデル)




※モデルにより各部の位置が異なる場合があります。

# 3 お手入れの仕方



付属のクロスで表面の汚れを拭き取ります。

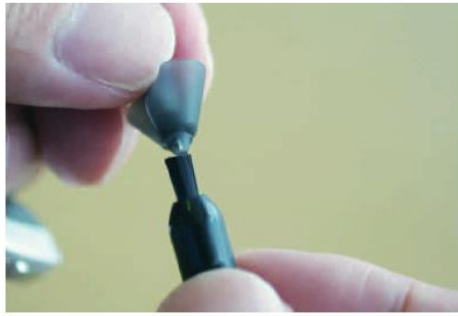

付属の掃除用ブラシを使って音の出口を下に向けてブラッシングします。

使用中のナノケアワックスガードをはずし、音の出口を軽くブラッシングをしてから新しいものを取り付けます。



交換用ナノケアワックスガード



# 便利なお手入れ用品



●補聴器掃除用ブラシ

# 4 保管の仕方

湿気は補聴器の大敵です。電池を外し、バッテリーホルダーを開いた状態で「補聴器乾燥ケース」へ入れましょう。



電池は外します

乾燥剤は新しいものを使いましょう



●ナノケアワックスガード (8本入り)



## ワイテックス株式会社

本社 〒131-0034 東京都墨田区堤通 1-19-9  
リバーサイド隅田セントラルタワー

補聴器ユーザー様専用フリーダイヤル：  
TEL ☎ 0120-332-604 FAX ☎ 0120-332-394  
ホームページ：<https://japan.widex.com/>

補聴器のご相談、ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。